


NIPLUX EYE RELAX S

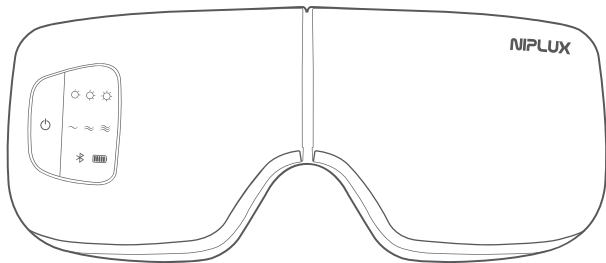

取扱説明書



保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp



公式サイト



操作方法動画

目次



| | |
|------------|----|
| 安全上のご注意 | 03 |
| 各部の名称とはたらき | 09 |
| 充電方法 | 10 |
| ご使用前の注意事項 | 12 |
| 使用方法 | 13 |
| お手入れ・保管方法 | 16 |
| 故障かなと思ったら | 17 |
| 商品仕様 | 18 |
| 無償保証規定 | 19 |
| 保証書 | 20 |

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

| | |
|---|--|
|  危険 | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。 |
|  警告 | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。 |

■お守りいただく内容を示す図記号

| | | | |
|---|--------------|---|----------------|
|  禁止 | その行為を禁止する内容。 |  必ず守る | 実行しなければならない内容。 |
|---|--------------|---|----------------|

警告



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●妊娠中および出産直後の方 ●糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●肌に傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど異常のある方 ●安静を必要とする方 ●体調が優れない方 ●発熱(38℃以上)している方 ●骨折、骨粗しょう症の方 ●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方(美容医療施術を含む) ●紫斑になりやすい方 ●極度近視の方 ●交通事故などによる頭部および眼科的後遺症のある方 ●医療機関で治療中の方 ●白内障や緑内障など眼病をお持ちの方や、眼圧に異常がある方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害の方 ●アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。





禁止

乳幼児や子供の手の届くところに保管したり、使用させたりしない。

ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

警告

| | |
|---|---|
|  禁止 | <p>他の機器と同時に使用しない。 ケガ、体調不良の原因になります。</p> |
| | <p>次のようなときは使用しない。 事故やケガ、体調不良の原因になります。 ●疲労が激しい時 ●飲酒後 ●睡眠中</p> |
| | <p>医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。 事故やケガ、体調不良の原因になります。 例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など</p> |
|  必ず守る | <p>本体や付属品に破損がないことを定期的を確認する。 事故やケガの原因になります。破損がある場合はご使用をお控えください。</p> |
| | <p>本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。充電中の場合は充電コードを抜く。 破損や発火、事故やケガの原因になります。 ●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出るなど</p> |
| | <p>お手入れする際や使用しないときは必ず電源を切る。 感電や故障の原因になります。</p> |

警告



禁止

- 充電コードは
- 先端部分を持ち、コードを引っ張らない。
 - 濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。
 - 収納時に本体などに巻きつけない。
 - 破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
 - 重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
 - 傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。
ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。
火災や感電、ケガや故障の原因になります。






必ず守る




交流100V～240Vで使用する。
海外で使用する際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。
電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

充電コードは付属品または同じタイプ (type-c) のものを損傷がないか確認したうえで使用する。
故障や事故の原因になります。

警告


| | |
|---|--|
|  禁止 | 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 事故やケガ、故障の原因になります。 |
| | 強く押し付けて使用しない。 事故やケガ、皮膚や筋肉を傷つける原因になります。 |
| | 塗り薬（スプレー式などを含む）や目薬と併用はしない。 体調不良や、目や肌のトラブルの原因になります。 |
|  水場禁止 | 本体および充電コードを水で濡らさない。 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電、ケガや故障の原因になります。 |
| | 肌や髪が濡れた状態で使用しない。濡れた手で触れない。 火災や感電、ケガの原因になります。 |
|  必ず守る | 初めて使用するときは慣れるまでは、レベル1および短時間で使用する。 強い刺激に慣れていないとケガの原因になります。 |
| | 1回の使用時間は15分以内とし、連続使用は避ける。 長時間の連続使用は、必要以上の刺激となりケガの原因になります。 |
| | 本体を装着し、ベルトで固定して使用する。 落下によるケガや故障の原因になります。 |
| | 仰向け、または座った状態で使用する。また、周囲の状況には十分注意して使用する。 転倒によるケガの原因になります。 |

警告


| | |
|---|--|
|  必ず守る | <p>本製品を使用するときは、頭部や顔周りのアクセサリ類を外す。 事故やケガの原因になります。</p> |
| | <p>つけまつげ、まつエク、メガネ、コンタクトは必ず外してから使用する。 目のトラブルの原因になります。 まつ毛パーマ等を行った場合も施術後しばらくはご使用をお控えください。</p> |
| | <p>開閉部に指などを挟まないようにする。 ケガ、故障の原因になります。</p> |
|  禁止 | <p>不安定な場所で保管しない。 また、本体や付属品の上に重いものを置いたり、落としたりぶつかけたりしない。 ケガや本体が破損、故障する原因になります。</p> |
| | <p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)や直射日光が当たる 場所で、保管、使用しない。加熱したり、火中に投下したりしない。 事故や部品の変形、故障、合成皮革の傷みの原因になります。</p> |
|  分解禁止 | <p>分解や修理、改造をしない。 火災や感電、ケガや故障の原因になります。 修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p> |

各部の名称とはたらき

本体(表)

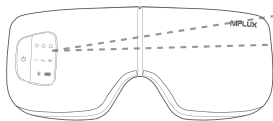

表示画面

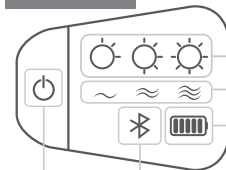

温熱表示ランプ
(レベル1~3の3段階表示)


加圧表示ランプ
(レベル1~3の3段階表示)

充電ランプ

電源ボタン

Bluetooth表示ランプ

本体(裏)

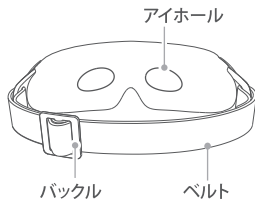


付属品



USB充電コード(type-c)



取扱説明書兼保証書

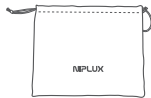


収納ポーチ

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。


充電方法



初めてご使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフしてから充電をしてください。

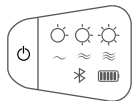


充電残量が減ると、「ブーブー」と警告音が鳴ります。

※充電切れになると、 ボタンを長押ししても充電ランプが点滅し、電源が入らなくなります。

1 | 付属の充電コードのtype-Cコネクタを本体中央の充電口に接続する。

※本体を折りたたむと充電口が開きます。

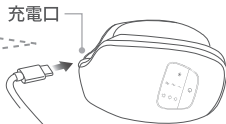


2 | 充電コードのUSB端子をACアダプターに接続し、壁面コンセントに差し込む。

※5V2A以下のACアダプターから充電してください。

(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

※ACアダプターは付属しておりません。

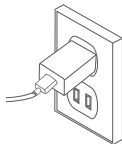

充電方法

| 3 | 充電ランプが点滅から点灯になると充電完了。

※充電中は本体の電源をオンにしないでください。

充電中：点滅



充電完了：点灯



| 4 | 充電完了後、充電コードを本体とACアダプターから取り外す。

充電時間の目安[※]



充電時間
約3時間



フル充電で
約60分使用可

※使用環境や充電環境、使用するモード・レベルによって
充電時間や動作時間は大きく異なります。

● 充電電池について

- 充電コードを差したまま使用できません。
- 充電電池は消耗品です(保証対象外)。
- 電池寿命は使用、保管などの状態により大きく変化します。

ご使用前の注意事項

縫製破れがないか確認

使用前に縫製破れがないか確認してください。
破れている場合は使用しないでください。



- ご使用前にヘアピン、ピアスなどのアクセサリー類は外してください。
- 使い始めは体調や肌の様子を見ながら、時間や回数を調整してご使用ください。
- 目薬を使用した際は、点眼後しばらく経ってからご使用ください。
- 目元パックやフェイスパックとの併用はお控えください。
- 目や目の周囲が熱すぎると感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- メイクをしたまま使用すると、メイクが本体に付着し表面が劣化する恐れがあります。
- ご使用後は顔に本体の跡が残る場合があります。お出かけ前のご使用にはご注意ください。
- ご使用後、温熱機能により一時的に目元が赤くなる場合があります。
通常時間経過により治まりますが、症状が回復しない場合は専門医にご相談ください。
- しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。

使用方法

| 1 | 本体を装着し、ベルトで固定する。


目を閉じ、仰向けや椅子に座って使用してください。
本体を逆さにして装着したり、
うつ伏せになって使用したりしないでください。

※アクセサリやつけまつげ、コンタクト等は外してから装着してください。



ベルト調節の仕方


バックルから調節したい分だけつまみだし、
ベルトを左右に引っ張って調節します。

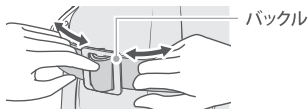

| 2 | 電源ボタンを約2秒間長押しして電源をオンにする。

電源をオンにすると表示画面が点灯し、温熱モード、レベル1で動作を開始します。

※電源を入れてから、約15分後に自動停止します。
途中で電源を切る場合は、電源ボタンを長押ししてください。

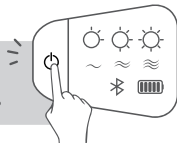


使用方法

| 3 | お手持ちの機器とBluetooth接続し、音楽を流す。


Bluetoothを使用する場合は、お手持ちの機器で「NIPLUX」を検出して接続してください。

※本機での音量調節や再生/停止はできません。
接続機器から操作してください。

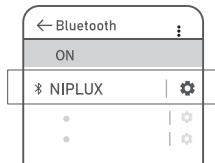

| 4 | 電源ボタンを2回短押ししてモードを切り替える。


「温熱のみ」「加圧のみ」「温熱と加圧」の3つのモードから選択可能です。

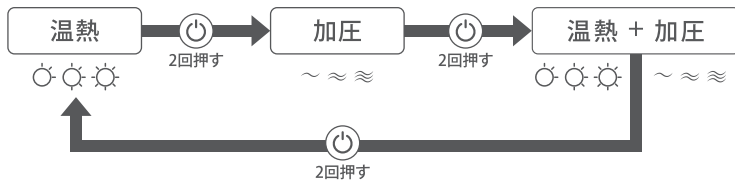

使用方法

| 5 | 電源ボタンを1回短押ししてレベルを切り替える。


| | 温熱レベル ☉☉☉ | 加圧レベル ～ ≈ ≐ |
|------|--------------|----------------|
| レベル1 | 38±2℃ | 優しい刺激 |
| レベル2 | 42±2℃ | ほどよい刺激 |
| レベル3 | 44±2℃ | しっかり刺激 |

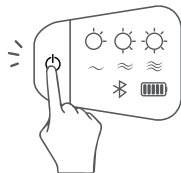

| 6 | 電源ボタンを約2秒間長押しして電源をオフにする。

※15分使用后、自動的に電源が切れます。

使用終了後は必ず電源をオフにして本体をお手入れしてください。

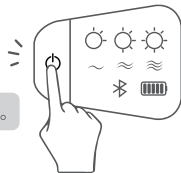

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- 目元の合成皮革は汗によって劣化しやすいため、こまめにお手入れし清潔に保つことが大切です。

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。また、使用後は必ず本体のお手入れをし、完全に乾いてから収納してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 目元の合成皮革が劣化し剥がれてきたら、製品の買い替え時です。そのままの状態でのご使用はお控えください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



故障かなと思ったら

| Q | A |
|-----------------|--|
| 充電が出来ない | 出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは出力が5V2A以内のものを使用してください。 |
| | ACアダプターまたは充電コードの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。 |
| | 充電口に付着物や破損がないか確認してください。 |
| | C to Cの充電コードでは充電できない場合があります。 必ず指定の充電コードをご使用ください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、 ACアダプターでの充電をお試しください。 |
| 電源が入らない | 充電中は使用できません。充電コードを外してから電源を入れてください。 |
| Bluetooth接続できない | 起動すると、接続範囲内にある以前接続した端末に自動的に接続されません。他の端末に接続する場合は、接続中の端末のBluetooth設定から「NIPLUX」を削除してから、ご使用される端末で「NIPLUX」を検出し接続してください。 |

商品仕様

| | |
|-------|---|
| ブランド | NIPLUX(ニップラックス) |
| 品名 | EYE RELAX S(アイリラックス エス) |
| 定格電源 | DC 5V 2A |
| 消費電力 | 約3.5W(充電時) |
| セット内容 | 本体×1/収納ポーチ×1/ USB充電コード×1 取扱説明書兼保証書×1 |
| 本体寸法 | 約215×31×78mm |
| 化粧箱寸法 | 約191×146×86mm |
| 重量 | 本体:約285g |
| 電池容量 | 850mAh |
| 使用環境 | 環境温度0-40℃ / 相対湿度≤70%RH |
| 製品素材 | 本体:PU、ABS、PC、シリコン、合成皮革 |
| 生産国 | 中国 |