

NIPLUX HIZAMOMIN 取扱説明書


保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp

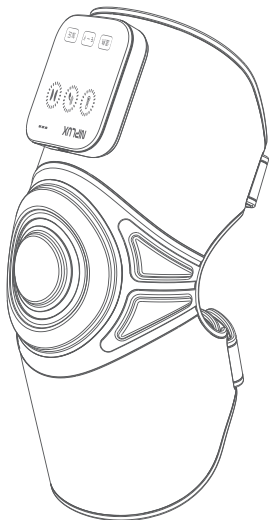

公式サイト



操作方法動画

目次

ご使用の前に	03
安全上のご注意	04
各部の名称とはたらき	11
ご使用前の注意事項	13
充電方法	14
使用方法	16
お手入れ・保管方法	19
商品仕様	20
故障かなと思ったら	21
無償保証規定	23
保証書	24

ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

セット内容

- 本体 1
- 収納ポーチ 1
- USB充電コード(type-c) 1
- 取扱説明書兼保証書 1

※デザインおよび仕様については予告なしに変更することがあります。

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。



※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

⚠ 危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心臓など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

⚠ 警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

他の機器と同時に使用しない。

事故やケガの原因になります。

乳幼児や子供の手の届く場所に保管したり、使用させない。ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

警告



禁止

次のようなときは使用しない。

下記に当てはまらない場合でも、身体に特に異常を感じているときは使用しない。

- 疲労が激しい時
 - 飲酒後
 - 食前、食後の1時間
 - 睡眠中
 - 皮膚に異常のある時
 - 運転中
 - 捻挫、肉離れなどケガをしている場合
- 事故やケガ、体調不良の原因になります。



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。





事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 悪性腫瘍のある方
- 心臓疾患、心臓に障害のある方
- 血栓のある方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 薬を服用中の方
- 妊娠中の方
- 出産直後の方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 肌に傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど異常のある方
- 安静を必要とする方
- 体調が優れない方
- 発熱している方
- 骨折、骨粗しょう症の方
- しつ蓋骨脱臼の経験がある方
- 人工ひざ関節置換術などの治療や手術を受けたことがある方
- かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方
- 体力が極端に衰えた方
- 自ら意思表示ができない方
- 操作が行えない方
- 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方
- 脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

警告

 <p>必ず守る</p>	<p>ご使用前に、本体や付属品に破損がないか、本体が正常に作動するか確認する。 事故やケガの原因になります。破損がある場合はご使用をお控えください。</p>
 <p>禁止</p>	<p>初めて使用するときや慣れるまでは、必ず短い時間で加圧と温熱はレベル1で使用する。 強い刺激に慣れていないとケガの原因になります。</p> <p>衣服の装飾など、かたいものの上に巻かない。 破損やケガの原因になります。</p> <p>膝以外の部位に使用しない。 事故やケガの原因になります。</p> <p>取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 事故やケガ、故障の原因になります。</p>
 <p>分解禁止</p>	<p>分解や修理、改造をしない。 火災、感電、ケガ、故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>
 <p>水場禁止</p>	<p>本体および充電コードを水で濡らさない。 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電、ケガの原因になります。</p>

警告



禁止

- 充電コードは
- 先端部分を持ち、コードを引っ張らない。
 - 濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。
 - 収納時に本体などに巻きつけない。
 - 破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
 - 重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
 - 傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。
火災や感電、ケガや故障の原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。
ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線をしてない。
電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。



必ず守る

充電コードは付属品または同じタイプ (type-c) のものを損傷がないか確認したうえで使用する。
故障の原因になります。

本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。
充電中の場合は充電コードを抜く。



- 異音・異臭 ●異常発熱 ●けむりが出るなど 破損や発火、事故やケガの原因になります。

交流100V~240Vで使用する。
海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。
火災、感電、故障の原因になります。

警告


 必ず守る	<p>使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。 医師に相談のうえ指示に従ってください。</p>
	<p>必ず、本体を面ファスナーで固定して使用する。 落下によるケガや故障の原因になります。</p>
	<p>1回の使用時間は片脚につき15分以内とする。 長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、低温やけどやケガの原因になります。</p>
	<p>使用中に本体を取り外す場合は、必ず電源をオフにしてから外す。 ケガの原因になります。</p>
 禁止	<p>本体を上下または前後逆に装着して使用しない。 ケガや体調不良の原因になります。</p>
	<p>本体に強い衝撃を与えたり、強く押し付けたりして使用しない。 ケガや体調不良の原因になります。</p>
	<p>使用中に立ったり歩いたりしない。 ケガや体調不良の原因になります。</p>
	<p>塗り薬（スプレー式などを含む）や湿布と併用しない。 肌トラブルや体調不良の原因になります。</p>

警告


 禁止	<p>ペンや針を突き刺さない。また、刃物で傷つけない。 本体の温感(ヒーター)部を傷つけ、火災や感電、やけどの原因になります。</p>
	<p>ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。 部品の変形、故障の原因になります。</p>
	<p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管・使用しない。 加熱したり、火中に投下したりしない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。</p>
	<p>不安定な場所で保管しない。 また本体を無理に折り曲げたり、重いものを乗せたり落としたりしない。 ケガや本体が破損、故障する原因になります。</p>
 必ず守る	<p>お手入れする際は必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く。 停電時は、直ちにACアダプターを抜く。 感電や思わぬ事故の原因になります。</p>

各部の名称とはたらき

本体(表)

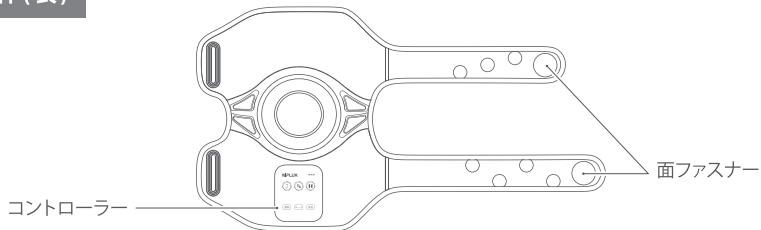


本体(裏)

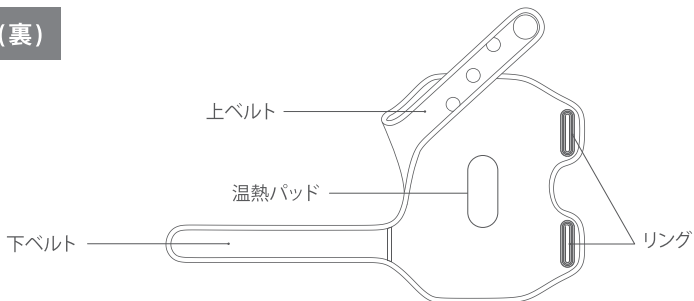

各部の名称とはたらき

コントローラー

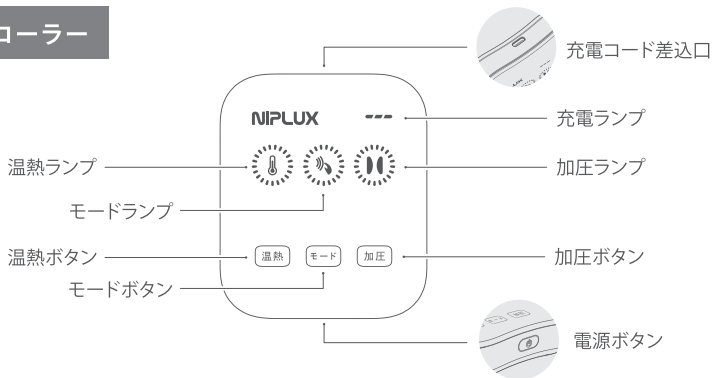

付属品



USB充電コード(type-c)




収納ポーチ(約350×300mm)




取扱説明書兼保証書

ご使用前の注意事項

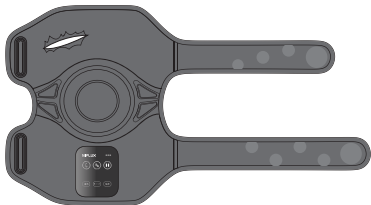

縫製破れがないか確認

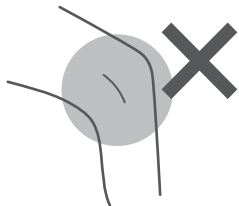

！ 使用前の注意事項

- 使用前に縫製破れがないか確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前に操作ボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。
- 脚の鬱血・痺れや圧迫感など違和感を感じた場合はすぐ使用を中止し、医師にご相談ください。

充電方法




ご使用前に満タンになるまで本体の充電を行ってください。
充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。



初めてご利用になるときや、「ピー」と10回音が鳴ったときは本体の電源をオフにしてから、充電してください。「ピー」が10回なると充電残量が少ない合図となり、その後充電が切れます。充電コードを差し込むと「ピピ」となります。

1 | 本体、充電コード、ACアダプターを 右図のように接続する。


- ※ 端子の形が一致するようにゆっくりと根元まで押し込んでください。
- ※ 製品の仕様上、本体と充電コードが2~3mm浮いた状態になりますが問題ありません。
- ※ 5V2A以下のACアダプターから充電してください。
5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。
- ※ ACアダプターは付属していません。

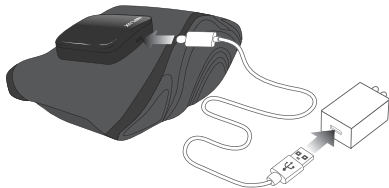

充電方法

- 2 | ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。
(充電中は3つのランプが充電残量に応じて点滅します。)

※充電をしながら本体の電源をオンにすることはできません。

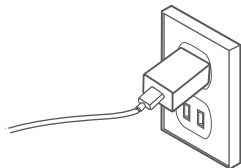

- 3 | 充電完了後、壁面コンセントからACアダプターを抜く。
(充電が完了したら3つのランプが全て点灯します。)




■充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3.5時間	約50分※

※電池残量や使用環境、使用するレベルやモードによって充電時間や動作時間は大きく異なります。

使用方法

- 1 | 面ファスナーをはずし、リングから抜いて本体を広げる。

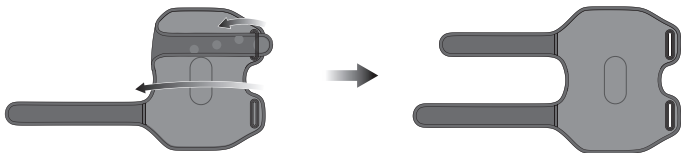



- 2 | コントローラーが太もも側になるように装着する。

上ベルトをリングに通して固定し、

下ベルトも同様の手順でずれないように固定してください。※1

※緩すぎたり、きつくしめすぎると、ズレや圧迫感を感じるのでご注意ください。

※必ずコントローラーが太ももの上に来るように装着してください※2

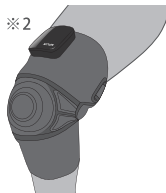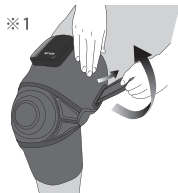


使用方法

3 | 電源ボタンを約2秒長押しして電源をオンにする。

「ピ」と音が流れ、【温熱レベル1、モード1、加圧レベル1】で開始します。

※電源を入れて約15分後に自動停止します。途中で停止したい場合は、電源ボタンを長押ししてください。「ピピ」と音が流れ停止します。

※使い始めは体調や肌の様子を見て、時間や回数を調節しながら使用してください。

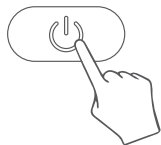

4 | モードや強さを選択する。

各ボタンを短押しし、お好みのモード・強さでご使用ください。操作のたび「ピ」と音が鳴ります。レベル3の状態でもう一度ボタンを押すと、その機能はオフになります。オフの状態でもう一度押すとレベル1へと繰り返されます。





※15秒間操作がない場合、または作動中に電源ボタンを押した場合、誤操作を防ぐためのロックがかかります。ロックがかかると、画面上のボタンを押しても「ピピ」と音が鳴りコントローラーが操作できなくなります。電源ボタンを短押しすると「ピー」と音が鳴り、解除できます。



使用方法

 ランプ表示				
温熱レベル/温度	温熱レベル1 ※1 約48℃	温熱レベル2 ※1 約53℃	温熱レベル3 ※1 約58℃	オフ

※温熱のみを使用するときは加圧レベルをオフにしてください。
※1…室温25℃の場合。ご使用環境によって温度は前後します。

 ランプ表示			
モード	モード1	モード2	モード3

※必ず加圧レベルの設定を行ってください。加圧レベルがオフになっていると加圧されません。
※モードを変更するたびに、加圧レベルは1にリセットされます。

 ランプ表示				
加圧レベル	加圧レベル1	加圧レベル2	加圧レベル3	オフ

※加圧のみを使用するときは温熱レベルをオフにしてください。

5 | 電源ボタンを約2秒長押しして電源をオフにする。

使用中に停止する場合は、電源ボタンを長押ししてオフにしてから、身体から取り外してください。

使用終了後は必ず電源をオフにして本体をお手入れしてください。



お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

保管方法

- ちりや埃が付着しないよう収納ポーチに入れて保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



商品仕様

ブランド	NIPLUX (ニップラックス)
品名	HIZAMOMIN(ヒザモミン)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約8.14W(充電時)
セット内容	本体×1 / 収納ポーチ×1 / USB充電コード×1 取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約360×620×30mm
化粧箱寸法	約184.5×98×231.5mm
重量	本体:約365g
電池容量	2200mAh
使用環境	環境温度-5~40℃ / 相対湿度≤80%RH
製品素材	本体:ABS、PC、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。
	充電口に付着物がないか確認してください。
	C to Cの充電コードでは充電できない場合があります。 必ず指定の充電コードをご使用ください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、 ACアダプターでの充電をお試しください。
電源が入らない	充電中は使用できません。 充電コードを外して再度電源を入れてください。
	充電残量が少なくなっています。 充電してください。
運転中に停止した	起動してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。

故障かなと思ったら

Q	A
「ピ」が10回繰り返される	充電残量が少ない時の警告音です。充電してください。
充電ランプが点灯しない	充電完了後、充電を続けるとランプが消灯します。電源をオンにして充電ランプで充電残量をご確認ください。
ボタンが反応しない	手が乾燥していたり、冷えていたりすると反応が悪くなる場合があります。保湿してお試ください。
ボタンの操作ができない	15秒間操作がない場合、または作動中に \cup ボタンを短押しした場合、ロックがかかります。 \cup ボタンを短押しすると「ピー」と音なりロックが解除され、操作できます。
温熱が感じられない	温熱のレベルが設定がされているか確認してください。
加圧が動作しない	加圧レベルがオフになっています。設定をご確認ください。